

# Twój plaster na zęby

## Plomb-<sup>®</sup>

Plomba tymczasowa  
do samodzielnego zakładania



### Wskazania: ubytki w zębach

Do stosowania zarówno w zębach stałych jak i mlecznych

Jedyny na rynku

Natychmiastowo



## Plomb-<sup>®</sup>

Tymczasowe wypełnienie zębów

3g

3g Tymczasowe wypełnienie zębów

Made in U.K.



▶ Do samodzielnej aplikacji

▶ Wystarcza przeciętnie na 10 wypełnień

▶ Gotowy do użycia

▶ 200ml 90 pętlia



- ▶ zabezpiecza ząb przed nadwrażliwością związaną z bolesną reakcją na ciepło i zimno
- ▶ zabezpiecza ząb przed nadwrażliwością związaną z dostawaniem się pokarmu - bolesna reakcja na słodkie i kwaśne
- ▶ zabezpiecza ząb przed czynnikami zewnętrznymi, jak bakterie i resztki jedzenia
- ▶ zabezpiecza język i policzki przed ostrymi krawędziami szkliwa
- ▶ chroni przed bolesnym uciskiem na dziąsło w miejscu gdzie brakuje zęba

Dystrybutor:



Trident S.A.

ul. Średnia 15/4  
41-200 Sosnowiec

tel.: +48 32 411 90 16  
tridentsa@tridentsa.pl

więcej na:

[www.plomb-r.pl](http://www.plomb-r.pl)

1



Wyciśnij niewielką ilość preparatu Plomb-R. Włóż do zęba który wymaga wypełnienia.

2



W przypadku zębów do których dostęp jest utrudniony, użyj szpatułki znajdującej się w opakowaniu.

3



Delikatnie zagryź. Pasta stwardnieje w kontakcie ze śliną. Sprawdź czy ząb nie jest nadmiernie wypełniony preparatem. Oczekaj minutę, a następnie przepłucz usta ciepłą wodą i wypłuj. Przez co najmniej 15 minut nie zagryzaj i nie dociskaj wypełnienia w zębie. Jak najszybciej udaj się do stomatologa.